

## Como reutilizar a máscara PFF-2/N95



A máscara conhecida como respirador N95 refere-se a uma classificação de filtro para aerossóis adotada nos EUA que equivale, no Brasil, à PFF2.

Conforme nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente – Mínimo de 95% de eficiência de filtragem) podem, EXCEPCIONALMENTE, ser usadas por período maior e/ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que pelo mesmo profissional e cumpridos todos os cuidados necessários, como por exemplo:

- ✓ Os servidores devem sempre inspecionar visualmente a máscara antes de cada uso, para avaliar sua integridade. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas;
- ✓ Para remover a máscara: retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para não tocar na superfície interna e acondicione em um saco ou envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. Os elásticos da máscara devem ser acondicionados de forma a não serem contaminados e facilitar a retirada da máscara da embalagem;
- ✓ Lavar as mãos com água e sabão ou utilizar substância à base de álcool, antes de colocar a máscara e após ajustá-la à face;
- ✓ Deve-se considerar o uso de protetores faciais concomitante com o uso da Máscara N95 ou similares para reduzir a contaminação da superfície.

## *Tire suas dúvidas!*

### 1. Máscara PFF-2/N-95 possui Certificado de Aprovação - CA?

Sim. O CA do EPI é uma garantia concedida ao equipamento de proteção que passou por todos os testes de qualidade e foi aprovado conforme a Norma Regulamentadora (NR) 6.

### 2. Máscara PFF-2/N-95 é reutilizável?

As máscaras não foram feitas para serem reutilizáveis, porém, **no cenário atual de uma situação pandêmica**, onde a demanda por EPIs é muito alta, houve essa exceção.

### 3. Como fazer o rodízio das máscaras PFF-2/N-95?

Cada máscara deve ter um descanso de 3 a 5 dias em local sem exposição ao sol, seco e arejado. Por isso é bom ter mais de uma máscara.

### 4. Quantas vezes posso utilizar a máscara PFF-2/N-95?

Não há um número exato de vezes que a máscara pode ser reutilizada.

### 5. Posso usar álcool 70% para higienizar a máscara PFF-2/N-95?

Não! Produtos como álcool ou desinfetante podem danificá-la.

### 6. Posso lavar máscara PFF-2/N-95 com água e sabão?

Não! Diferente das máscaras de pano, as máscaras PFF2/N-95 não devem ser lavadas. Esse processo pode danificá-la.

**FONTE:** BRASIL. ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. 2020. Disponível em: [https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims\\_ggtes\\_anvisa-04\\_2020-25-02-para-o-site.pdf](https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf). Acesso em: 17 nov. 2022.  
BRASIL. MTB. . Norma Regulamentadora 6. 1978. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-06.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2022.  
DANIELLE SANCHES (São Paulo). Viva Bem - Uol. Máscara PFF2/N95: é descartável? Posso reutilizar? Tire suas dúvidas. 2021. Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/03/16/mascara-pff2n95-e-descartavel-posso-reutilizar-tire-suas-duvidas.htm>. Acesso em: 17 nov. 2022.  
DANNY EPI. Como reutilizar a máscara N95 (PFF2)? Disponível em: <https://www.danny.com.br/blog-post/como-reutilizar-a-mascara-n95-pff2/>. Acesso em: 17 nov. 2022.  
PROMETAL EPIS (Pelotas). Máscara PFF2: Quando utilizar? Disponível em: <https://www.prometalepis.com.br/blog/mascara-pff2-quando-utilizar/#:~:text=Portanto%2C%20dentro%20do%20intervalo%20de,esteja%20com%20suspeita%20de%20contamina%C3%A7%C3%A3o..> Acesso em: 17 nov. 2022.